

Lesen Sie diese Anleitung gemäß Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte bitte gewissenhaft durch und bewahren Sie sie für späteres Nachschlagen auf. Machen Sie sich unbedingt mit dem KINDERSICHER-System und den unter „Dosierungsgrundlagen“ angegebenen Medikamenten vertraut, bevor sie es einsetzen!



Lieferumfang

Das KINDERSICHER-System besteht aus: **Infoplip der 6. Auflage CH**, verpackt in einer transparenten Schutzhülle mit dem farbcodiertem **Kindermaßband „Standard-Version 2017“**. Das Maßband dient der Längenabschätzung von Kindern nach dem Broselow-Code. Anhand dieses Farbcodes gibt der zugehörige KINDERSICHER-Infoplip Empfehlungen zur Auswahl passender Ausrüstung sowie zur Dosierung von Medikamenten für Kinder bis zu ca. 144 cm Größe.



Korrekturen von Druckfehlern oder Anpassungen von Dosierungen

finden Sie auf der Homepage <https://kindersicher.promediq.ch/>

Warnhinweise

Melden Sie bitte jeden Verdacht auf im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretene, schwerwiegende Vorkommnisse umgehend dem u.a. Hersteller sowie der zuständigen Behörde: in Österreich: www.swissmedic.ch
Setzen Sie das Maßband in Notfallsituationen ein, schützen Sie sich vor potentiell infektiösen Flüssigkeiten (Blut, Speichel, Erbrochenes) durch das Tragen persönlicher Schutzausrüstung (Handschuhe, Schutzbrille). Halten Sie das Maßband von blutenden oder offenen Wunden fern! Nutzen Sie den KINDERSICHER-Infoplip abseits vom Patienten, um eine Kontamination in den sauberen Bereich der Vorbereitung von Material und Medikamenten zu verhindern. Lassen Sie Säuglinge und Kleinkinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Produkt!

Längenmessung/ Anwendung

Breiten Sie das zugehörige Maßband berührungsfrei, in ca. 20 cm Abstand, entlang des Kindes aus. Legen oder halten Sie das Ende mit der Beschriftung „Dieses Ende an den Kopf anlegen“ in Höhe des Scheitels. Lesen Sie dann in Höhe der Füße den Broselow-Farbcode ab. Nutzen Sie zur Farbcodierung ausschließlich das Original KINDERSICHER-Maßband. Anschließend schlagen Sie im KINDERSICHER-Infoplip die farblich entsprechend gekennzeichnete Seite auf, um je nach Broselow-Farbzone die passende Ausrüstung und Medikamentendosierungen abzulesen. Folgende Informationen werden für jede Farbzone bereitgestellt:

- Normalwerte für Atemfrequenz (AF), Puls und Blutdruck (RR)
- Empfehlungen für die Reanimation, insbesondere Wahl der Defibrillations/ Kardioversionsenergie
- Größempfehlungen für Medizinprodukte (Spatel, Tubus, Tubustiefe, Führungsstab)
- Medikamentenempfehlungen mit Konzentrationen und für diesen Farbcode empfohlener Patientendosis in ml

Die Informationen zu Defibrillation und Medikamentendosierungen sind an medizinisches Fachpersonal (Ärzte, Pflegekräfte, Rettungsdienst) gerichtet, die befugt sind, diese Maßnahmen durchzuführen. Dabei gelten die rechtlichen Rahmenbedingungen der medizinischen Notfallversorgung: Medikamentengabe nur durch Ärzte oder nach Verfahrensanweisungen der ärztlichen Leiter in Krankenhaus/ Rettungsdienst. Es finden sich auch gängige Medikamentendosierungen im Infoplip (z.B. für MAD), die einem Off-Label-Gebrauch entsprechen.

Reinigung/ Desinfektion

Das KINDERSICHER-Maßband und der Infoplip sind wiederverwendbar. Das Maßband sollte nach jeder Verwendung mit für Medizinprodukte zugelassenen, ungefärbten Desinfektionsmitteln feucht abgewischt und desinfiziert werden. Nutzen Sie dazu am besten ein nicht scheuerndes Tuch oder fertig getränkte Wischtücher („Wipe-Systeme“). Bedenken Sie die vollständige Benetzung und die Einwirkzeit des Desinfektionsmittels nach Herstellerangaben. Der KINDERSICHER-Infoplip ist wasserabweisend laminiert und kann ebenfalls mit den o.a. Desinfektionsmitteln abgewischt werden. Ist die sichere Verwendung etwa durch nicht beherrschbare Kontamination mit potentiell infektiösen Flüssigkeiten (Blut, Speichel, Erbrochenes) oder Ausbleichung des Farbcodes bzw. der Beschriftung nicht mehr gegeben, darf das Produkt nicht mehr angewendet und muss entsorgt werden.

Materialbeschaffenheit

Das Maßband ist mit wasserbasierter, wisch- und waschfester Latexfarbe gedruckt und setzt keine Lösungsmittel frei. Brandklasse B1/DIN4102-1 schwer entflammbar. Temperaturbereich für Einsatz und Lagerung: -20/+70°C.



Hersteller: KINDERSICHER, Dr. T. O. Zugck
Sophie-Dethleffs-Str. 17, 25746 Heide/Germany

CH-REP + Import: PromediQ GmbH, CHRN-AR-20000970
Gian Cajöri, Vogelsangstr. 18, CH-8606 Nänikon/Schweiz



Consultez la version française de ce mode d'emploi sur notre site Internet
Le istruzioni per l'uso in lingua italiano è disponibile sulla homepage web della

www.kindersicher.ch