

Veuillez lire attentivement ces instructions selon le (EU) 2017/745 Règlement européen sur les dispositifs médicaux et vous familiariser avec le système avant son utilisation !



Contenu du coffret

Le système SECURITE ENFANT se compose : du carnet SECURITE ENFANT et du ruban pédiatrique composé d'un code couleur compatible avec les zones de Broselow version 2017.

Le ruban pédiatrique est utilisé pour estimer la taille des enfants d'après le code couleur Broselow. L'équipement approprié et le dosage de médicaments pour les enfants d'une taille jusqu'à environ 150 cm sont basés sur le code couleur et les recommandations du carnet SECURITE ENFANT.

Mise en garde

Signaler les incidents graves au fabricant et aux autorités www.ansm.sante.fr.

Utilisez le ruban pédiatrique dans des cas d'urgence, protégez vous contre les liquides potentiellement infectieux (sang, salive, vomissements) en portant vos équipements de protection individuelle (gants, lunettes) lors du placement du ruban pédiatrique. Tenez-le éloigné de saignements ou de plaies ouvertes ! Utilisez le carnet Enfant Sécurité loin du patient afin d'éviter une contamination de la zone propre de préparation du matériel et des médicaments.

Mesure de la taille / application

Placer le ruban pédiatrique le long de l'enfant, à environ 20 cm de distance. Placer ou maintenir l'extrémité avec le marquage « Placer cette partie à la tête » à hauteur du sommet de la tête et effectuer la lecture aux pieds de l'enfant. Sélectionner le code couleur Broselow. Chez les enfants obèses sélectionner la prochaine zone de couleur en direction du pied.

Rechercher ensuite dans le carnet Enfant Sécurité la couleur de la page dûment caractérisée pour identifier les équipements et les dosages de médicaments appropriés en fonction de la zone de couleur Broselow.

Les informations suivantes sont fournies pour chaque code de couleur Broselow :

- Les valeurs normales pour la fréquence respiratoire, pouls, tension artérielle (syst), PAM et PAM si TC grave
- Recommandations pour la réanimation, en particulier le choix de la défibrillation / énergie cardioversion
- Recommandations des tailles pour l'équipement médical (Lame, Profondeur pour tube ET, guide)
- Recommandations des médicaments ainsi que leur concentration et la dose recommandée chez les patients en ml pour ce code couleur

Les informations concernant la défibrillation et le dosage des drogues sont destinés aux professionnels de santé (médecins, infirmières, services médicaux d'urgence) qui sont autorisés à exécuter ces mesures. Ce sont les conditions légales des services médicaux d'urgence qui sont applicables : médicaments uniquement prescrits par des médecins ou par des procédures du directeur médical du service hospitalier / service des secours.

Nettoyage / désinfection

Le ruban pédiatrique peut être nettoyé et désinfecté à l'aide de produits non colorés homologués pour produits médicaux. Il est conseillé d'utiliser une éponge non abrasive, un chiffon ou des lingettes imprégnées toutes prêtes. Suivre les conseils du fabricant du désinfectant quant au nettoyage et au temps de désinfection. Le carnet ENFANT SECURITE plastifié étanche peut également être essuyé selon les recommandations précédentes.

Recyclage

Le ruban et le carnet ENFANT SECURITE sont réutilisables. Ils peuvent être jetés avec les ordures ménagères s'ils ne sont plus d'actualité (dernière mise à jour) ou si leur utilisation n'est plus sûre. S'ils sont contaminés avec du sang / vomi, ils doivent être éliminés pour des raisons de sécurité et scellés dans un sac en plastique.

Propriétés du matériau

Le ruban est imprimé avec des peintures latex à base d'eau indélébiles et lavables et ne libère pas de solvant. Il fait partie de la classe de matériaux B1 / DIN4102-1 difficilement inflammable. Plage de température pour l'utilisation et le stockage -20 / + 70 * C



Fabricant Dr T.O. Zugck, Info@KINDERSICHER.me
Sophie-Dethleffs-Strasse 17 D-25746 Heide/Allemagne

Distributeur LSF France, www.lifesupportfrance.fr
85d rue du Général de Gaulle 68440 Dietwiller/France

